

Arbeitsanleitung

Befüllung von **one system⁺PLUS**



Bei der Verwendung von Feuchttuchspendern zur Flächendesinfektion sind die grundsätzlichen hygienischen Standards zu berücksichtigen. Zum Arbeitsschutz des Anwenders empfehlen wir, chemikaliendichte Schutzhandschuhe zu tragen. Mit den folgenden Produkten kann, bei korrekter Handhabung, eine Standzeit von 42 Tagen erreicht werden: OPTISAL PLUS, OPTISAL N, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT FORTE, DESCOSEPT PUR, CLEANISEPT. Bei Verwendung von Fremdprodukten können die 42 Tage Standzeit nicht gewährleistet werden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller für genaue Angaben. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

①

Entnahmedeckel des Vliestuchspenders abschrauben. Mit der Oberseite auf eine saubere Fläche legen.

②

Die bereits enthaltene Vliestuchrolle mit 3 L gebrauchsfertiger Desinfektionsmittellösung tränken.

③

Schutzdeckel des Entnahmedeckels öffnen.

④

Das erste Tuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen.

⑤

Den vorderen Teil des Tuchs durch die sternförmige Entnahmeöffnung im Entnahmedeckel ziehen.

⑥

Den Entnahmedeckel wieder aufschrauben und den Schutzdeckel schließen. Das herausgezogene Tuch muss vollständig vom Schutzdeckel umschlossen sein.

⑦

Das Dokumentationsfeld mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen.

⑧

Nach 15 Minuten Vortränkzeit ist das System einsatzbereit. Wichtig: Das erste Tuch verwerfen. Nach Gebrauch Spender wieder verschließen.

⑨

Einwegsystem! Eventuelle Restflüssigkeit entsorgen, den Spender mit offenem Entnahmedeckel zusammenpressen und dem Recycling zuführen.