

PERFEKTAN® NEU



PREVENT

INSTRUMENTENREINIGUNG UND -DESINFEKTION FÜR INVASIVE MEDIZINPRODUKTE. NICHT ZUR DESINFEKTION ALS ENDPUNKT DER VERARBEITUNG FÜR INVASIVE MEDIZINPRODUKTE GEEIGNET.

1 / 5

Tuberkulozid wirksam

Gute Reinigungskraft

Konzentrat mit dezentem Zitrusduft

Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad



INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN® NEU



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 5

PERFEKTAN NEU ist ein flüssiges Reinigungskonzentrat auf Basis von Alkylaminen. Die effiziente aldehyd- und phenolfreie Wirkstoffbasis ermöglicht eine materialschonende sowie anwenderfreundliche Instrumentenaufbereitung z.

B. auch von flexiblen Endoskopen und vermeidet eine unerwünschte Eiweißfixierung bei der Reinigung. Durch die desinfizierenden Eigenschaften von PERFEKTAN NEU wird die Anwendersicherheit unterstützt.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Instrumentenreinigung und -desinfektion für invasive Medizinprodukte. Nicht zur Desinfektion als Endpunkt der Verarbeitung für invasive Medizinprodukte geeignet.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Die PERFEKTAN NEU Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser (max. 40 °C) ansetzen. Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser gemäß nationaler Richtlinien herstellen. Desinfizierende Reinigung im Tauchbadverfahren: Instrumente, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, im geöffneten Zustand in die Gebrauchslösung einlegen und wo erforderlich mechanisch reinigen. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit möglichst VE- Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen und weiter aufbereiten. Zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet. Desinfektion in Tauchbadverfahren: Instrumente nach vorheriger Reinigung, im geöffneten Zustand vollständig in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche Flächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit VE-Wasser abspülen, trocknen und weiter aufbereiten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Bei Reinigung im Ultraschallbad: Die Beschallungszeit gemäß der Herstellerangabe sowie Temperaturen von 40 °C nicht überschreiten. Die Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln. PERFEKTAN NEU darf nicht mit anderen Prozesschemikalien gemischt werden. Ultraschallbadverfahren: PERFEKTAN NEU kann zur Erhöhung der Reinigungsleistung in allen Ultraschallbädern aus Edelstahl verwendet werden. Die zur

Reinigung verwendete, frisch angesetzte PERFEKTAN NEU Gebrauchslösung muss vor der ersten Verwendung entgast werden. Temperaturen über 40 °C in der Gebrauchslösung sind zu vermeiden, da diese zu Inkrustierungen führen können. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Medizinprodukte gründlich mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen.

Endoskope: Endoskop sofort nach der Anwendung mit einem fusselfreien Tuch vorreinigen. Endoskop anschließend vollständig in die PERFEKTAN NEU Gebrauchslösung einlegen und entsprechend der gültigen Verfahrensanweisung reinigen. Nach erfolgter Reinigung Endoskop gründlich mit Wasser zwischenspülen und der weiteren Aufbereitung zuführen. Die Angaben der Endoskophersteller sind zu beachten.

Als Endpunkt der Verarbeitung für invasive Medizinprodukte ab der Risikoklasse semikritisch A mit einem viruzid wirksamen Desinfektionsmittel, zum Beispiel mit PERFEKTAN ACTIVE oder DESCOTON EXTRA aufbereiten. Im Umgang mit PERFEKTAN NEU ist geeignete Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Weiterführende Informationen unter www.bgw-online.de. Instrumente und Wannen vor Erstbenutzung von PERFEKTAN NEU gründlich reinigen, um Chemikalienrückstände zu entfernen. Instrumentenwannen sind mindestens arbeitstäglich zu reinigen und zu desinfizieren.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 3,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Enthält: 15 - 30 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe: Limonene, Terpeneol.

PERFEKTAN® NEU



ANWENDUNGEN UND HINWEISE

3 / 5

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polycarbonat (PC). Bei folgenden Materialien kann es zu oberflächlichen Veränderungen kommen: Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC/ABS). Nicht geeignet für Larynxmasken. PERFEKTAN NEU ist für die Verwendung an Endoskopen folgender Firmen freigegeben:

- Olympus-Winter & Ibe
- Richard Wolf GmbH

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

PERFEKTAN® NEU



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

4 / 5

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion						
bakterizid ¹ , levurozid ¹	EN 13727	hohe Belastung	2 %	1 %		
	EN 14561	hohe Belastung	2 %	1 %		
	EN 13624	hohe Belastung	2 %	1 %		
	EN 14562	hohe Belastung	2 %	1 %		
tuberkulozid ¹ (M. terrae)	EN 14348	hohe Belastung				2 %
	EN 14563	hohe Belastung				2 %
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung			2 %	1 %
	EN 17111	hohe Belastung			2 %	1 %
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid ¹ , levurozid ¹	VAH / EN ²	hohe Belastung		3 %	2 %	1 %
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung		1 %		
	EN 14561	hohe Belastung	2 %		1 %	
levurozid (C. albicans)	EN 13624	hohe Belastung	2 %	1 %		
	EN 14562	hohe Belastung		2 %	1 %	
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14563	hohe Belastung				2 %
Ultraschallbad						
Desinfizierende Reinigung im Ultraschallbad (Elmasonic S-30H): bakterizid, levurozid	In Anlehnung an VAH-Methode	hohe Belastung	1 %			

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 und Phase 2 Stufe 2 Tests (Quantitative Suspension Tests und quantitative Keimträgertests)

2 – EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562

PERFEKTAN® NEU



GEBINDE

5 / 5

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
PERFEKTAN NEU	Dosierflasche	10	1 L	00-136-010	01833848
	Kanister	3	5 L	00-136-050	01833860

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:
<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001,
verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.